

# WitBP6012/WitBP6016 系列电子血压计

一键测量 精确智能 双用户模式 蓝牙传输



## 概述

WitBP6012/WitBP6016系列提供了不同型号的电子血压计，均支持脉率、舒张压、收缩压、平均压测量，选配蓝牙功能，满足家用健康护理的需求。

WitBP6016系列是惟拓力家用健康血压测量解决方案的重要组成部分，相较于WitBP6012系列，该设备屏幕尺寸增大，新增背光显示及袖带收纳的功能。可以有效运作3年，通过了严格的电气安全测试和可靠性测试，是家用血压测量的理想之选。



> WitBP6012A:  
小尺寸



> WitBP6012B:  
蓝牙  
小尺寸



> WitBP6016A:  
袖带收纳  
背光显示  
大屏幕




> WitBP6016B:  
蓝牙  
袖带收纳  
背光显示  
大屏幕

如需了解更多信息，请联系我们: [sales@szwitleaf.com](mailto:sales@szwitleaf.com)

**Witleaf**

## 产品特点

- > 一键轻松测血压，简单、可靠、易用
- > 双用户模式，可快速切换，每人90组数据记忆
- > 最近3次测量平均值显示
- > 时间日期显示，数据记录查看更方便
- > 搭配专用USB健康管理软件，轻松实现血压测量、数据分析和打印
- > 蓝牙4.0通讯，搭配专用APP，实现无线血压测量和管理
- > 节能环保设计，1分钟自动休眠，任意键轻松唤醒

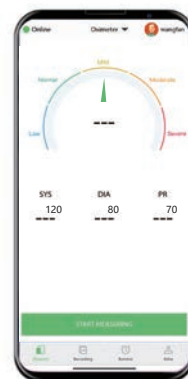

○ 三组平均值



○ 舒适智能加压技术



○ 一体化袖带收纳

7天测量平均值显示  
自动休眠 任意键唤醒  
一体机身 袖带收纳  
超大屏幕 高清显示  
访客模式 保护隐私

○ 贴心细节

## 注意事项

1. 不适合饭后、运动及情绪激动时测量。在使用电子血压计测量血压之前，应先休息几分钟，以消除疲劳、兴奋等血压的影响。运动后，必须休息30分钟才能进行测试。
2. 每天同一时间测量，早上起床或午休后血压升高符合血压波动的一般规律，此时最能真实反映被测者的最高血压。

3. 臂带应系在手臂的正确位置，臂带中心与心脏在同一水平线上。
4. 测量过程中不要说话或摇晃身体；连续测量应间歇5分钟。
5. 臂套不能过紧或过松，只要能轻松插入食指即可，气管应位于手臂内侧，掌心向上。



## 技术规格

---

### 收缩压

测量范围: 60~255mmHg

---

测量精度: 平均偏差 $< \pm 5$ mmHg 标准偏差 $< 8$ mmHg

---

分辨率: 1mmHg

### 舒张压

测量范围: 30~195mmHg

---

测量精度: 平均偏差 $< \pm 5$ mmHg 标准偏差 $< 8$ mmHg

---

分辨率: 1mmHg

### 袖带压

测量范围: 0~300mmHg

---

测量精度:  $\pm 2$ mmHg 或读数的 $\pm 1\%$  (取较大值)

---

分辨率: 1mmHg

### PR

测量范围: 40~190bpm

---

测量精度:  $\pm 2$ bpm或读数的 $\pm 2\%$  (取较大值)

---

分辨率: 1bpm

## 标准配置 (含包装) :

- 1 × 血压计
- 1 × 袖带
- 1 × USB
- 1 × 电源适配器 (可选)
- 1 × CD (健康管理软件和英文用户手册)

	WitBP6012	WitBP6016
袖带收纳		✓
液晶屏	3 inch	5.5 inch
平均值	✓	✓
高精度	✓	✓
双用户模式	✓	✓
数据存储	2x90	2x90
早/晚记录		✓
供电方式	4*AA 碱性电池 (不含) 交流适配器 (可选)	4*AA 碱性电池 (不含) 交流适配器 (可选)
误操作提醒	✓	✓

\* 数据仅供参考，一切以实际使用情况为准，本文件中包含的信息如有变更，恕不另行通知。

### 深圳市惟拓力医疗电子有限公司

地址: 深圳市光明区玉塘街道光明高新园西片区森阳电子科技园厂房一栋1201  
电话: +86 0755-21384132  
邮箱: sales@szwitleaf.com  
官网: www.szwitleaf.com



Witleaf

